


วิธีใช้ ถังออกซิเจน (Oxygen Tank)

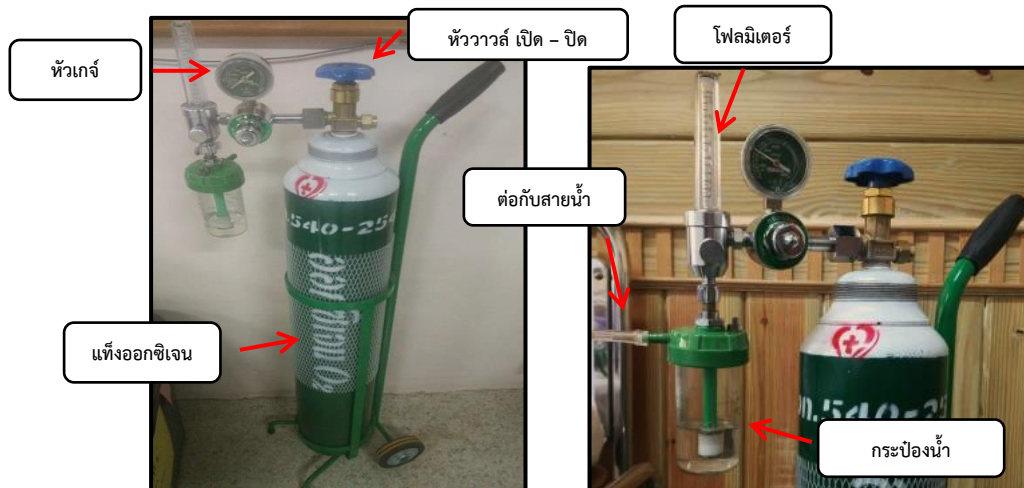

ขั้นตอน	รูปประกอบ
1. ปิดวาล์วให้แน่นสนิทก่อน 2. ต่อหัวแก๊ส (หรือเรกูเลเตอร์) เข้ากับท่อออกซิเจนใต้ หัววาล์ว โดยใช้กุญแจเลื่อนหมุนจนแน่น	
3. ถ้าใช้ออกซิเจนมากกว่า 2 ลิตรต่อนาที ควรต่อ กระป๋องน้ำทำความชื้น เข้ากับโพลมิเตอร์ ดังรูป	

4. ต่อสายนำแก๊สออกซิเจนเข้ากับโพลมิเตอร์ หรือ กระป๋องน้ำทำความชื้น	
5. เปิดวาล์วและหมุนปุ่มโพลมิเตอร์เพื่อเปิดอัตราไหล ของแก๊สตามที่ผู้ป่วยต้องการ แล้วต่อสายนำแก๊สออกซิเจนเข้ากับตัวผู้ป่วย	
6. เมื่อไม่ต้องการให้ออกซิเจน ปิดวาล์ว และ ปิดโพลมิเตอร์ ถอดสายนำแก๊สออกจากตัวผู้ป่วย	