


ขั้นตอนการเปิดการใช้งานหุ่นทางการพยาบาล GD/H1200

1. เปิดคอมพิวเตอร์ตัวควบคุม



2. เปิดคอมพิวเตอร์ตัวแสดงผล

3. เปิดกล่องควบคุม โปรแกรม

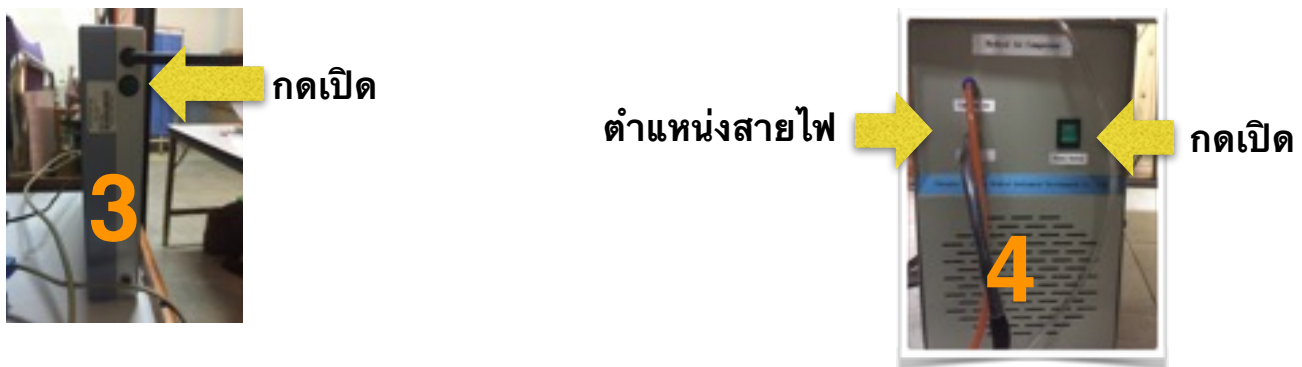

4. เปิดเครื่องปั๊มลม

- ตรวจสอบสายไฟสีดำและสีส้มว่าอยู่ในช่องเสียบดังภาพ
- กดปุ่มสีเขียวเพื่อเปิดเครื่อง

5. เปิดเครื่องวัดความดันโลหิต



ปิดการใช้งานเริ่มจากขั้นตอนที่ 5 ถึง 1 ตามลำดับ