

วิธีการเตรียมอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)



ขั้นตอน	รูปภาพประกอบ
เตรียมอุปกรณ์หุ่นสำหรับ CPC - นำอุปกรณ์มาประกอบเข้ากับตัวหุ่น เช่น ปลั๊ก หน้าจอแสดงผลการ CPR	A photograph of a CPR training device connected to a mannequin. The device is a white rectangular unit with a digital display and several buttons. It is connected to the mannequin via a cable. The mannequin is lying on a blue surface.
- นำปลั๊กมาต่อเข้ากับตัวหุ่นและจอแสดงผล (1 หัวต่อเข้ากับจอ อีก 1 หัวจอเข้ากับตัวหุ่น)	A composite of three photographs showing the CPR training device and its connection to the mannequin. The top-left photo shows the device with its display and buttons. The top-right photo shows a close-up of the device's connector plugged into the mannequin's chest. The bottom photo shows another close-up of the device's connector plugged into the mannequin's chest.



หลังจากต่อสายเข้ากับตัวหุ่นเรียบร้อยแล้ว
กดปุ่ม ...
Start เพื่อเริ่มการใช้งาน
Reset เพื่อตั้งค่าการใช้งานใหม่

